



Hinweise zur Entnahme von Milchproben für die Untersuchung auf Haptoglobin (Entzündungsmarker) oder Progesteron (Reproduktionsmanagement)

Für den Probenversand stellen wir Ihnen speziell stabilisierte Teströhrchen zur Verfügung, die bei uns zu einem Preis von 2,00 € (zzgl. MwSt.) pro Röhrchen angefordert werden können (per Telefon, Fax oder E-Mail). Diese Kosten werden Ihnen bei einer beauftragten Untersuchung wieder auf den Rechnungsbetrag gutgeschrieben.

Beschriftung der Proberöhrchen

- Beschriften Sie die Außenseite jedes Röhrchens mit einem wasserfesten Stift mit der entsprechenden laufenden Probennummer des Laborauftrags (1, 2, 3, ...).
- Füllen Sie den Laborauftrag vollständig aus und geben Sie bei jeder Probennummer die entsprechende Ohrmarkennummer an.

Probennahme

Bitte verwenden Sie für jede Milchprobe ein neues Röhrchen.

Die Probenahme für Haptoglobin sollte frühestens 6 Tage nach dem Abkalben erfolgen. Da Haptoglobin bei allen Entzündungen gebildet wird, spielt es keine Rolle, aus welchem Euterviertel die Milchprobe stammt (auch Sammelgemelk kann analysiert werden). Falls jedoch ein Mastitisverdacht besteht, kann eine Analyse aller Euterviertel dazu beitragen, das erkrankte Euterviertel zu identifizieren.

1. Einige Strahlen vormelken und verwerfen um den Strichkanal zu säubern.
2. Zitzen reinigen und desinfizieren (z.B. mit 70% Alkohol).
3. Für jede zu untersuchende Probe ein neues Röhrchen etwa bis zur Hälfte mit Milch (Anfangsgemelk) befüllen.
4. Röhrchen gut verschließen und bis zum Versand kühl lagern.

Verpackung und Versand

- Umwickeln Sie die auslaufsicher verschlossenen Röhrchen mit saugfähigem Material wie z.B. Zellstoffpapier / Küchentücher.
- Der Versand kann z.B. in gepolsterten Umschlägen als Maxibrief (Porto 2,40 €), oder in kleinen Kartons als Päckchen erfolgen (Sie können hierfür z.B. den von uns zum Röhrchenversand benutzten Karton verwenden oder entsprechende Kartons bei uns anfordern). Bitte ggf. mit Zeitungspapier auffüllen um ein Umherfliegen der Röhrchen im Karton zu verhindern.
- Die Proben senden Sie bitte mit vollständig ausgefülltem Untersuchungsauftrag ausreichend frankiert an:

Sension GmbH
Provinostr. 52
Gebäude B14
86153 Augsburg