

Sension GmbH  
Provinstr. 52 / Gebäude B14  
86153 Augsburg  
Telefon +49(0)821/455 799-0  
Telefax +49(0)821/455 799-22  
E-Mail info@sension.eu

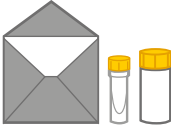



## ***Testanleitung Kapillarblut***





 0821/455 799-0


 info@sension.eu


- 1  Legen Sie die mitgeschickten Utensilien zur Blutentnahme bereit und kleben Sie die mitgeschickten Nummern jeweils einmal auf das Blutauffangröhrchen und einmal auf den Untersuchungsauftrag in das Feld „Proben ID“


---
- 2  Waschen Sie Ihre Hände mit Seife und **warmem** Wasser und regen Sie durch Kreisen des Arms die Durchblutung an


---
- 3  Desinfizieren Sie mit dem Alkoholpad den Mittel- oder Ringfinger Ihrer nicht dominanten Hand

---
- 4  Entfernen Sie die Spitze der Stechhilfe mit einer Drehbewegung

---
- 5  Setzen Sie die Stechhilfe in der Mitte der Fingerkuppe auf und drücken Sie hinten fest auf den farbigen Knopf. Die Nadel wird ausgelöst und Sie werden einen kleinen Pikser spüren


---
- 6  Den ersten Blutstropfen bitte mit dem trockenen Tupfer entfernen

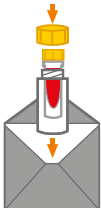
---
- 7  Halten Sie Ihren Finger schräg an die Wandung des Blutauffangröhrchens, damit das Blut hineinlaufen kann. Massieren Sie dabei Ihren Finger weiter, damit die Durchblutung angeregt wird. Der Vorgang kann mehrere Minuten dauern.

---
- 8  Beenden Sie die Entnahme erst, **wenn die Markierung (400 µl) erreicht ist**, da die Probe ansonsten nicht auswertbar ist. Klopfen Sie das Röhrchen mehrmals leicht auf den Tisch, damit das Blut nachlaufen kann

---

Haben Sie das Röhrchen befüllt, drücken Sie kurz mit dem trockenen Tupfer auf die Einstichstelle, um die Blutung zu stoppen

---
- 9  Verschließen Sie das Röhrchen durch festes Aufdrücken des Deckels, bis ein leichtes Klicken zu hören ist und **schwenken Sie das Röhrchen mehrfach**

---
- 10  Schieben Sie das gefüllte Blutauffangröhrchen mit dem Blut in das größere Transportröhrchen, ohne das enthaltene Saugvlies zu entfernen. Verschließen Sie das Transportröhrchen gut

---

Stecken Sie das Transportröhrchen zusammen mit dem ausgefüllten und unterschriebenen Untersuchungsauftrag in den Rücksendeumschlag und frankieren Sie diesen, um die Probe an unser Labor schicken zu können

---