



1

• Kryptopyrrol & Indikan

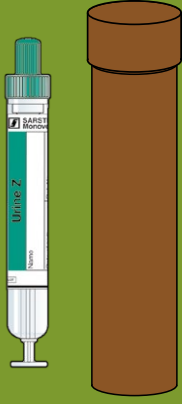

2

• Säure-Base-Test

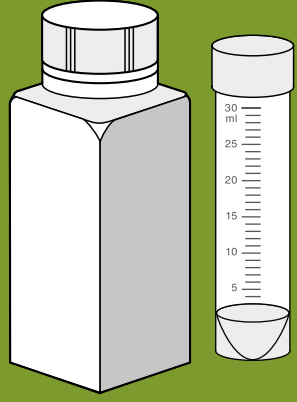

## Testanleitung für die Messungen

- Kryptopyrrol & Indikan
- Säure-Base-Test

[www.sension.eu](http://www.sension.eu)

[www.sension.eu](http://www.sension.eu)

Version: V01

Sension GmbH  
 Provinstr. 52 / Gebäude B14  
 86153 Augsburg  
 Telefon +49(0)821/455 799-0  
 Telefax +49(0)821/455 799-22  
 E-Mail [info@sension.eu](mailto:info@sension.eu)



## Testanleitung

## Urin Pferd



0821/455 799-0

[info@sension.eu](mailto:info@sension.eu)

[www.sension.eu](http://www.sension.eu)

# Testanleitung Urin Pferd

## Allgemeine Hinweise Urindiagnostik

- Laborauftrag vollständig und gut leserlich ausfüllen.
- Das gut verschlossene Spezialröhrchen muss im Schutzgefäß zur Analyse an unser Labor eingeschickt werden. Verwenden Sie hierzu bitte die beigelegte Versandtasche (Laborauftrag beilegen) und frankieren Sie diese ausreichend.
- Die Urin-Monovette® ist mit einem Pulver zur Stabilisierung der Probe befüllt; bitte entfernen Sie dieses nicht aus dem Spezialröhrchen.


**1**

### Hinweise zur Bestimmung von Kryptopyrrol & Indikan

- Eine Woche vor Probennahme keine Vitamin B6-, B12- und Zinkpräparate zufüttern.
- Nutzen Sie zum Auffangen des Urins möglichst Rituale Ihres Pferdes (Pferde urinieren z.T. gerne in die frisch eingestreute Box, oder nach dem Ausreiten etc.)
- Urin sofort nach Probennahme in die Urin-Monovette® aufziehen und in das Lichtschutzröhrchen geben.

## Vorgehen

- 1 Urin-Monovette® leserlich mit dem Namen des Pferdes, Probennahmedatum und ggfs. Name des Besitzers beschriften.
- 2 Stopfen entfernen und aufbewahren!
- 3 Beiliegende Saugspitze auf die Urin-Monovette® aufsetzen.
- 4 Den Urin in einem geeigneten, sauberen Gefäß auffangen und umgehend in die Urin-Monovette® hochziehen.
- 5 Die Saugspitze ins Gefäß eintauchen und die Urin-Monovette® bis zur Basis-Linie aufziehen.
- 6 Die Urin-Monovette® senkrecht halten und die Kolbenstange bis zum Anschlag nach unten ziehen, um die Saugspitze zu entleeren.
- 7 Die Saugspitze abziehen und die Kolbenstange abknicken, beides entsorgen. Den Stopfen wieder aufsetzen.
- 8 Die Urin-Monovette® umgehend in das braune Lichtschutzröhrchen mit dem Saugtuch geben und verschließen.
- 9 Den Untersuchungsauftrag vollständig und gut leserlich ausfüllen.
- 10 Das Lichtschutzröhrchen inkl. Urin-Monovette® zusammen mit dem Untersuchungsauftrag in die beiliegende Versandtasche geben.
- 11 Versandtasche verschließen und ausreichend frankiert zur Post geben.

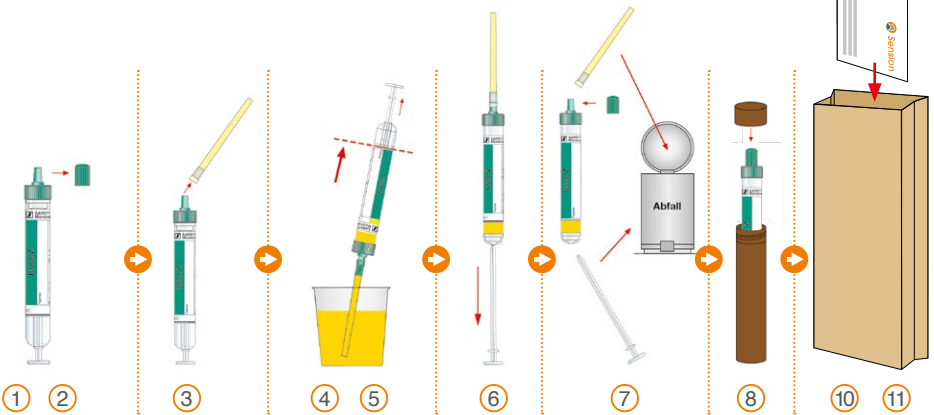
**2**

### Hinweise zum Säure-Base-Test

- 2 Tage vor der Probennahme keine Basenpräparate zufüttern.
- Das Urinröhrchen muss mindestens bis zur Markierung „15 ml“ befüllt sein.

## Vorgehen

- 1 Urinröhrchen leserlich mit dem Namen des Pferdes, Probennahmedatum und ggfs. Name des Besitzers beschriften.
- 2 Den Urin in einem geeigneten, sauberen Gefäß auffangen und umgehend in das Urinröhrchen umfüllen.
- 3 Urinröhrchen umgehend verschließen und in das Versandgefäß mit dem Saugtuch geben und verschließen.
- 4 Den Untersuchungsauftrag vollständig und gut leserlich ausfüllen.
- 5 Das Versandgefäß inklusive Urinröhrchen zusammen mit dem Untersuchungsauftrag in die beiliegende Versandtasche geben.
- 6 Versandtasche verschließen und ausreichend frankiert zur Post geben.

