

Testanleitung

Stand 06/2024, Version 01

Darmflora-Analyse

- Sammeln Sie in einem Gefrierbeutel 1-2 frische Kotballen.
- Achten Sie darauf, nur frischen Kot ohne Verunreinigung aufzusammeln!
- Bei Bedarf kann der Kot durch einen Tierarzt rektal entnommen werden.

Fellmineral-Analyse

- Schneiden Sie das Fell entlang der Körperhaut ab; nehmen Sie das Fell von Stellen, die wenig gekratzt/beleckt werden.
- Benötigt werden 2 gehäufte Esslöffel Fell (ca. 0,5 Gramm).
- Achten Sie darauf, keine Mähnen- oder Schweifhaare zu verwenden.
- Bitte waschen Sie die Haare NICHT!
- Geben Sie die Haare für den Versand in kleine, gut verschließbare Klarsichtbeutel.

Aromatogramm

- Die Abnahme eines Hautgeschabsels lassen Sie bitte durch Ihren Tierarzt durchführen.
- Bei der Einsendung von Fell zupfen Sie das betroffene Fell aus und packen es in einen sauberen, kleinen und gut verschließbaren Klarsichtbeutel.
- Für einen Abstrich nutzen Sie bitte ausschließlich die von uns bereitgestellten Tupfer. Achten Sie darauf, mit dem Tupfer nur die zu untersuchende Stelle zu berühren, um eine Kontamination zu vermeiden. Geben Sie ihn sogleich in das mit schwarzem Spezialmedium gefüllte Röhrchen und versenden Sie ihn so schnell wie möglich an unser Labor.