

# Testanleitung für die Messungen

- Methylmalonsäure
- Kryptopyrrol, Indikan, Citrullin

[www.sension.eu](http://www.sension.eu)

[www.sension.eu](http://www.sension.eu)

Sension GmbH  
Provinstr. 52 / Gebäude B1\_5  
86153 Augsburg  
Telefon +49(0)821/455 799-0  
Telefax +49(0)821/455 799-22  
E-Mail [info@sension.eu](mailto:info@sension.eu)



No. 05-09 Testanleitung Urin Human/V02



## Testanleitung



 0821/455 799-0

 [info@sension.eu](mailto:info@sension.eu)

[www.sension.eu](http://www.sension.eu)

## Allgemeine Hinweise

- Bitte während der Menstruation keinen Urin gewinnen, um eine Kontamination mit Blut zu vermeiden
- In der S-Monovette® befindet sich eine Stabilisierungslösung. Bitte lassen Sie diese im Probengefäß
- Eine Woche vor Urinabgabe keine Vitamin B6-, B12- und Zinkpräparate einnehmen.
- Für die Analyse benötigen wir Morgenurin
- Idealerweise schicken Sie uns den ersten Morgenurin. Sollten Sie nachts öfter auf die Toilette müssen, empfiehlt es sich, den Urin über Nacht in einem sauberen Gefäß lichtgeschützt zu sammeln und uns eine Probe aus dem gesammelten Urin zu schicken.

## Vorgehen

- ① S-Monovette® leserlich mit Patientennamen, ggfs. Therapeutennamen und Probenahmedatum beschriften.
- ② Beiliegenden Multi-Adapter auf die S-Monovette® aufsetzen und durch kurzes drehen im Uhrzeigersinn einrasten lassen
- ③ Den Urin in einem geeigneten, sauberen Gefäß auffangen und umgehend in die S-Monovette® umfüllen
- ④ Den Multi-Adapter ins Gefäß eintauchen und die S-Monovette® bis zur Basis-Linie (siehe auch Abbildung) aufziehen.
- ⑤ Die S-Monovette® senkrecht halten und die Kolbenstange bis zum Anschlag nach unten ziehen, um den Multi-Adapter zu entleeren.
- ⑥ Den Multi-Adapter durch Drehen abziehen und die Kolbenstange abknicken, beides entsorgen.
- ⑦ Die S-Monovette® umgehend in das braune Lichtschutzröhrchen mit dem Saugtuch geben und verschließen.
- ⑧ Den Untersuchungsauftrag vollständig und gut leserlich ausfüllen.
- ⑨ Das Lichtschutzröhrchen inkl. S-Monovette® zusammen mit dem Untersuchungsauftrag in die beiliegende Versandtasche geben.
- ⑩ Versandtasche verschließen und ausreichend frankiert zur Post geben.

