

Testanleitung Säure-Base Test (Tagesprofil / Einzelschnelltest)

Stand 06/2024, Version 01

Allgemeine Hinweise:

- 2 Tage vor dem Test keine Basentabletten einnehmen.
- Nach jeder Probennahme (ca. 25 ml) die Blase vollständig entleeren. Um die folgenden Probennahmen zu erleichtern, wird empfohlen, nach jeder Blasenentleerung ein Glas Wasser zu trinken.
- Für den Einzelschnelltest: Bitte kurz vor der Hauptmahlzeit die Blase vollständig entleeren und 3 Stunden nach Nahrungsaufnahme die Urinprobe abgeben.
- Für das Tagesprofil: Bitte beim Befüllen auf die korrekte Reihenfolge der Röhrchen achten!

Probe-Nr.	Uhrzeit der Probennahme	
1	6 Uhr	Danach Frühstück
2	9 Uhr	
3	12 Uhr	Danach Mittagessen
4	15 Uhr	
5	18 Uhr	Danach Abendessen



Sension

Biologische Detektions- und
Schnelltestsysteme



Telefon +49(0)821/455 799 -0
Telefax +49(0)821/455 799 -22
E-Mail info@sension.eu

www.sension.eu